

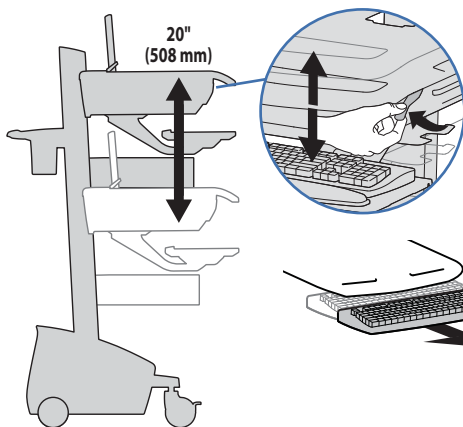



INSTELLINGSBEREIK

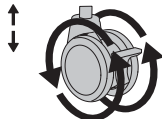


VOORZICHTIG! Maak de remvergrendeling volledig los voordat u de cart omhoog of omlaag beweegt. Als u de cart omhoog of omlaag beweegt terwijl de rem gedeeltelijk vast zit, kan dat het product beschadigen.

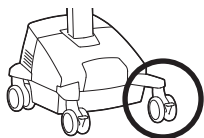

Wielrotatie

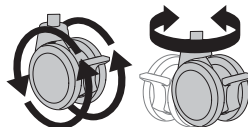

Wielrotatie en -zwenking

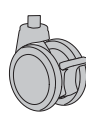


Vergrendel

ERGONOMIE

Werken

aanpassen - aan uw lengte


- 1 Zet de bovenzijde van het beeldscherm circa 2,5 cm onder de hoogte van uw ogen. Zet de rem los en zet het beeldscherm naar behoefte hoger of lager.
- 2 Kantel het scherm totdat u het comfortabel kunt lezen. Hierdoor ontziet u uw ogen en uw nek.
- 3 Trek de toetsenbordplank naar voren en plaats de muisplank en het muisetui naar believen aan de rechter- of linkerkant.
- 4 Werk met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen. Hierdoor ontziet u uw armspieren.
- 5 Als de staander moeilijk op en neer gaat, of als hij niet in de gewenste stand blijft staan, lees dan in de handleiding bij dit product hoe u dit aanpast.
- 6 Ga mee met de stroom!
Steek wanneer dat maar mogelijk is de stekker in het stopcontact zodat de batterij opgeladen blijft en de computer kan blijven draaien.

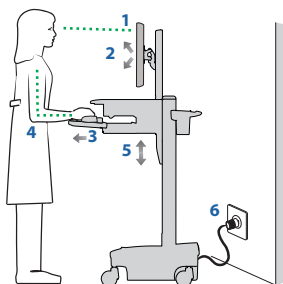

Verplaatsen


berg op - voordat u weggaat

- 1 Wanneer u de trolley normaal verplaatst, zet u de rem los en zet u het werkkoppervlak in de laagste stand. Dit waarborgt een optimale stabiliteit en vrij zicht.
- 2 Doe open laden dicht en berg muis, scanner en andere toebehoren op de juiste plaats op.
- 3 Ontgrendel beide voorste zwenkwielen.
- 4 Duw de wagen vanaf de achterkant met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen; hierdoor hebt u maximale controle en ontziet u uw armspieren.
- 5 Haast u langzaam!
Voordat u gaat rijden, controleert u of de stekker uit het stopcontact is gehaald en het netsnoer aan de mand is gehaakt voor veilig vervoer. En onthoud: elke dag moet de batterij 100% worden opgeladen!

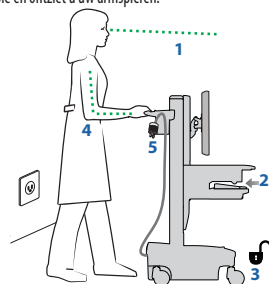


TOETSENBORDLAMPJE

Uw computer moet aanstaan om dit lampje te laten functioneren. Het toetsenbordlampje gaat automatisch na 15 minuten uit, als het niet handmatig uitgezet wordt.

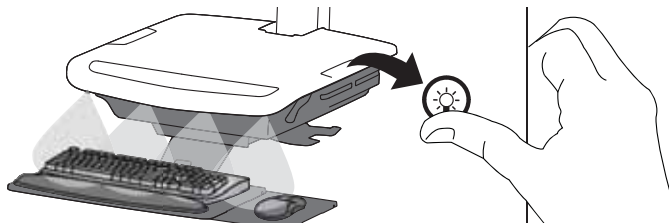

Als de batterij leeg raakt, wordt dit aangegeven op de interface van het power systeem met een reeks brandende of knipperende percentagelampjes (rood, geel en groen). Wanneer de batterij minder dan 30% gevuld is, hoort u een pieptoon. Onthoud dat de batterij dagelijks opnieuw moet worden opgeladen tot 100% en dat u de wagen tijdens het opladen kunt gebruiken - steek dus altijd als dat kan de stekker in het stopcontact zodat u nooit zonder stroom komt te zitten!

OPMERKING: plaats het beeldscherm in energiespaarstand om de gebruikstijd van de batterij te optimaliseren.

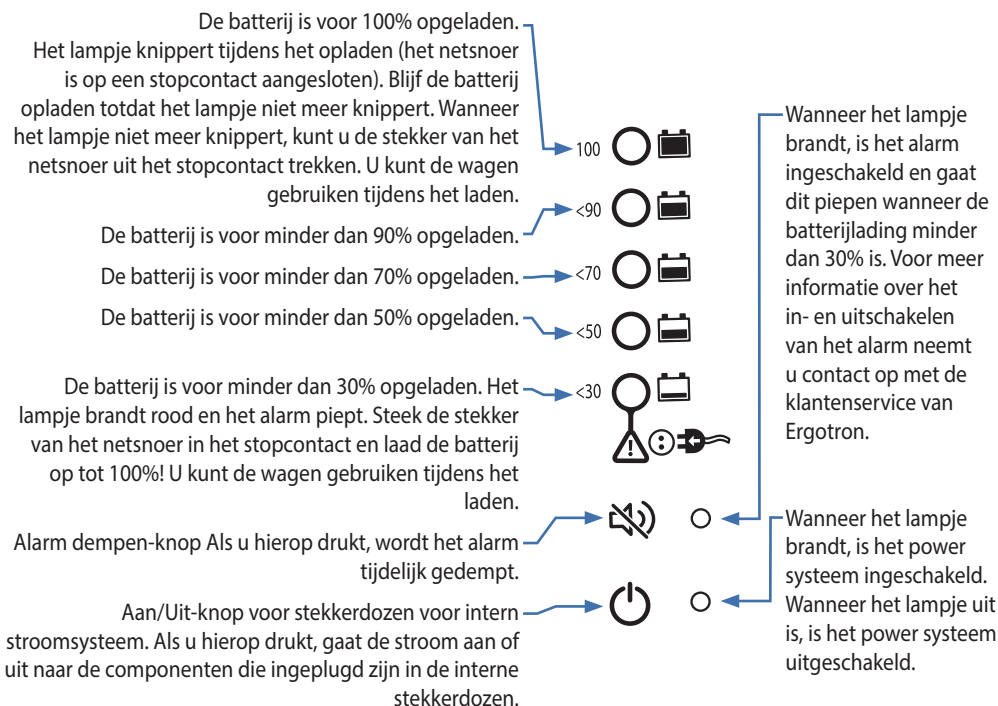

OPMERKING: frequent gebruik van de trolley bij een batterijniveau van minder dan 30% verkort de levensduur van de batterij aanzienlijk.